

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ одноразовых электродов

Наложение электродов должно производиться только врачом или техником по снятию ЭКГ

Подготовьте надлежащим образом участок наложения электродов, удалив при необходимости с кожи волосяной покров.

Удостоверьтесь в абсолютной чистоте и сухости кожи.

Снимите защитную пластиковую пленку с липкой поверхности электрода.

Прикрепите электрод к коже, слегка прижав его рукой.

Подключите провод к электроду.

Приступите к снятию ЭКГ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Соблюдайте инструкции мониторингового оборудования для того чтобы снизить риск ожогов на участках наложения электродов во время электрохирургических операций.
- Не накладывайте электроды на участки с эритемами, ранками или иными кожными повреждениями.
- Не используйте для пациентов, у которых при прямом контактами с электродами возникают кожные раздражения, извещайте о любых реакциях несовместимости.
- Не использовать в случае, если гель высох или обесцветился.
- Только для радиопрозрачных электродов: Очень важно быть осведомленным, что маркировка применяется только для радиопрозрачных электродов, не для мониторов, кабелей или проводов которые могут прилагаться к электродам. Радиопрозрачные электроды могут использоваться только с проводами совместимыми с используемым МРТ оборудованием.